



PPC AUTOPILOTEE AVEC PLAGE DE TRAVAIL.

REMSTAR AUTO C-FLEX

FOURNISSEUR : RESPIRONICS



MODES : PPC ou PPC + C-FLEX.

PPC AUTOPILOTEE ou PPC AUTOPILOTEE + C-FLEX

Paramètres à définir :

- **Le niveau de pression minimale en cmH²O**
- **Le niveau de pression maximale en cmH²O**
- **Le temps d'établissement**
- **Le niveau de C-Flex (1, 2 ou 3)**

APPRECIATION SERVICE TECHNIQUE APARD

Observations Techniques

- **Le système C-Flex permet de moins freiner l'expiration du patient, tout en maintenant en fin d'expiration le niveau de PEP requis**
- **De taille et de poids corrects, il peut lui être ajouté un humidificateur chauffant adapté asservi par le générateur**
- **Possibilité d'une alimentation externe 12 volts**

Convivialité du produit

- **Suivi patient et adaptation du traitement facilité par un historique détaillé, le transfert des données PC/générateur se fait par l'intermédiaire d'une carte flash qui doit rester insérée dans l'appareil durant son utilisation par le patient**
- **La mise en fonction du temps d'attente ou de l'humidificateur chauffant ne sont pas automatiques et nécessitent l'intervention du patient**

AIDE aux réglages

Mise en route aisée, une plage de travail suffisamment ouverte permet de couvrir sans difficulté les besoins du patient. Le mode C-Flex apporte un confort à l'expiration et est utile pour des pressions élevées ou des problèmes d'aérophagie.